

Fokserød, 20.april 2020

Covid-19 - Anbefalinger for rengjøring av mikrofoner og utstyr

I forbindelse med oppstart av barnehager og skoler har vi utarbeidet generelle anbefalinger for rengjøring av AudioLink lydanlegg. Anbefalingene i dette skrivet er utarbeidet i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI).

Vi har sendt konkrete spørsmål til FHI angående rengjøring av hodebøylemikrofoner og håndholdte mikrofoner og har valgt å ta med svarene fra FHI i dette skrivet. Se spørsmål og svar nedenfor.

- Svar fra FHI angående anbefalt rengjøring av hodebøylemikrofoner og håndholdte mikrofoner:

"Her vil vi anbefale å rengjøre utstyret imellom hver bruker. Se for øvrig generelle råd om rengjøring her: <https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/>"

- Svar fra FHI angående om to elever bruke samme mikrofon i en skoletime uten rengjøring i timen, men med en rutine for rengjøring mellom hver skoletime?:

«Det er greit at de to samme elevene kan bruke en felles mikrofon innenfor den samme skoletimen hvis det er de to samme elevene som bruker mikrofonen hver gang. Og de rengjør i hvert friminutt»

Basert på disse svarene fra FHI har vi utarbeidet generelle anbefalinger for rengjøring av AudioLink lydanlegg, se nedenfor.

Vestfold Audio's anbefalinger

Generelt anbefales det fra FHI å rengjøre denne type utstyr mellom hver bruker. SARS-CoV-2 lar seg enkelt fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

Hodebøyle mikrofoner

- Hodebøylemikrofonene bør rengjøres mellom hver bruker.
- Det anbefales å benytte en lett fuktet klut med vann og rengjøringsmidler. Det kan benyttes sprit, men dette kan redusere levetiden til produktet.
- Hodebøylemikrofonen bør tørke før den benyttes igjen

Vestfold Audio AS

Håndholdte mikrofoner

- De to samme elevene kan benytte en felles håndholdt mikrofon innenfor den samme skoletimen uten at den må rengjøres mellom hver gang de prater. Mikrofonen skal da rengjøres i hvert friminutt.
- For øvrige brukssituasjoner skal håndholdte mikrofoner rengjøres mellom hver bruker.
- Det anbefales å benytte en klut lett fuktet med vann og rengjøringsmidler. Det kan benyttes sprit, men dette kan redusere levetiden til produktet.
- Mikrofonen bør tørke før den benyttes igjen.

Annet utstyr

Annet utstyr (f.eks mikrofonlader og forsterkere) bør rengjøres etter de rutiner som etableres for forsterket renhold på utsatte områder. Det anbefales å benytte lett fuktet klut med vann og rengjøringsmidler. Vi henviser her videre til anbefalinger gitt i smittevern veiledere fra FHI.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller ønsker veiledning.

Vennlig hilsen

Asgeir Orskaug
Salgs- og markedssjef